

# Empfehlungen zur Minimierung von Hautreaktionen



Nach der Anwendung des DERMABOND™ PRINEO™ Systems kann es zu Hautreaktionen (z. B. Rötungen, juckende Ausschläge, Blasen usw.) kommen. Mit den nachstehenden Empfehlungen, die sich auf die Gebrauchsanweisung stützen, kann ein mögliches Auftreten dieser Reaktionen minimiert werden.

## Vor der Anwendung des Produkts – Patientenauswahl

Das DERMABOND™ PRINEO™ System sollte nicht bei Patient:innen mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Cyanacrylat, Formaldehyd, Benzalkoniumchlorid (BAC) oder Haftkleber angewendet werden.<sup>1</sup>

Da diese Inhaltsstoffe auch in nichtmedizinischen Produkten wie Haushalts- oder Schönheitsprodukten enthalten sein können, sollten Sie den/die Patient:in nach früheren Hautreaktionen auf die folgenden Produkte fragen, da dies auf eine Empfindlichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen des DERMABOND™ PRINEO™ Systems hinweisen kann.




Cyanacrylat	Sekundenkleber, künstliche Wimpern, künstliche Fingernägel	  
Formaldehyd	Farben, Lacke, Industrieklebstoffe (z. B. Teppichkleber)	  
Benzalkoniumchlorid (BAC)	Kosmetika, Reinigungstücher, Antibakterielle Heftpflaster	  
Pressure-sensitive adhesives	Heftpflaster, Tapeverband, Erste-Hilfe-Verband	  

# Produktanwendung

Den lokal angewendeten Gewebekleber ordnungsgemäß über dem Netz auftragen.



## SCHRITT 1

Verteilen Sie den flüssigen Klebstoff mit dem Klebeapplikator **gleichmäßig über die gesamte Länge des Netzes** und bedecken Sie dabei nur einen kleinen Rand der umliegenden Haut.<sup>1</sup>

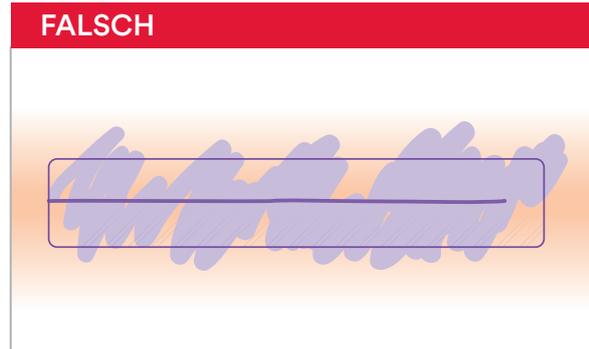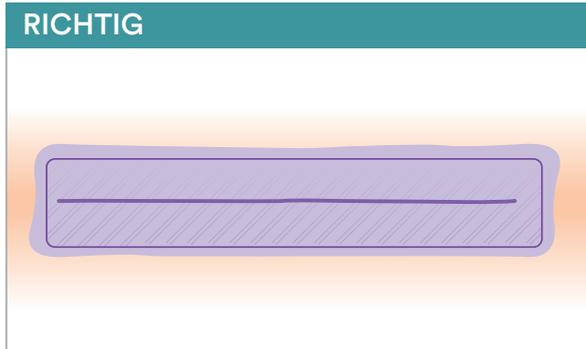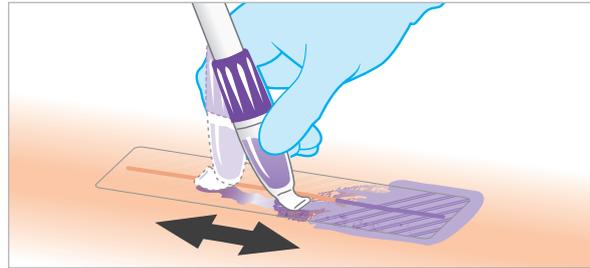

## SCHRITT 2

Wischen Sie überschüssigen, flüssigen Klebstoff, der aus dem Netz ausgetreten ist, umgehend mit einer steriler Gazekomresse ab.<sup>1</sup>

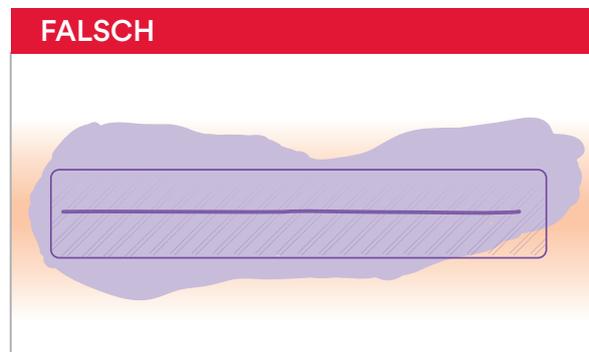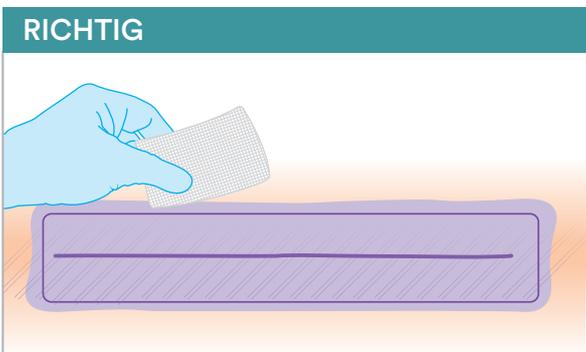

Die oben genannten Empfehlungen sollen dazu beitragen, das Auftreten von Hautreaktionen bei der Verwendung des DERMABOND™ PRINEO™ Wundverschlussystems zu verringern. Es besteht dennoch die Möglichkeit, dass es zu Hautreaktionen kommt.

**Referenz:** 1. Ethicon, LAB-0013100/Rev6 DERMABOND™ PRINEO™ Wundverschlussystem, Gebrauchsanweisung, Januar 2020. Registrierte Daten.

Für aktuelle und vollständige Anleitungen beachten Sie bitte immer die der Verpackung beiliegende Gebrauchsanweisung.

Johnson & Johnson AG  
Gubelstrasse 34  
6300 Zug  
SCHWEIZ  
Tel.: +41 800 830 085  
www.jnj.ch

**ETHICON**  
Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

© Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH, (2022), 2024, CH\_ETH\_WOUN\_319289