

# Ci prendiamo cura della sua ferita

Dopo che le è stato applicato il Sistema per la chiusura della cute DERMABOND™ PRINEO™

### **Il suo medico ha deciso di utilizzare un sistema per la chiusura della sua ferita <sup>1</sup>**

- Il sistema per la chiusura della cute è la combinazione di una rete e un liquido adesivo che permette all'incisione o alla ferita di rimanere chiusa durante il processo di guarigione.
- Il sistema per la chiusura della cute deve rimanere in posizione finché il suo medico non stabilisce che si sia raggiunta un'adeguata guarigione, che solitamente avviene in 7-14 giorni. In molti casi, esso viene facilmente rimosso con un semplice gesto e senza alcun fastidio.
- In caso si noti che il Sistema di sintesi stia iniziando a perdere tenuta o si stia staccando contatti il suo medico.

## Cosa bisogna sapere

### **Bagno o doccia <sup>1</sup>**

Se consentito dal suo medico, può bagnare occasionalmente e velocemente la sua incisione o ferita trattata con il Sistema per la chiusura della cute nella doccia o nella vasca. Non bagnare eccessivamente né strofinare la ferita. Non nuotare o immergere la ferita nell'acqua. Dopo la doccia o il bagno, asciugare delicatamente la ferita con un asciugamano soffice. Se si è utilizzata una protezione asciutta sopra il sistema per la chiusura della cute, se ne dovrebbe riposizionare una nuova e asciutta dopo la doccia o il bagno, come indicato dal suo medico. Si dovrebbe fare anche attenzione affinché nessun adesivo parte di una protezione asciutta venga a contatto con il sistema per la chiusura della cute perché quando viene rimosso, l'adesivo potrebbe anche rimuovere il sistema per la chiusura della cute.



## Processo di guarigione

Se si verificano arrossamento, gonfiore, dolenzia, calore o pus, contattare il proprio medico e lui/lei valuterà lo stato della sua incisione o ferita ed adotterà le misure necessarie per risolvere eventuali problemi.

## Attività fisica <sup>1</sup>

Non praticare attività fisica intensa che possa causare ulteriore tensione sull'incisione o ferita. Segua le indicazioni del suo medico riguardo la tempistica per la ripresa delle normali attività quotidiane.

## Rimozione del Sistema per la chiusura della cute <sup>1</sup>

- Il suo medico valuterà quando il processo di guarigione della ferita sarà completato e quando il sistema per la chiusura della cute potrà essere rimosso. Ciò si verifica, in genere, tra i 7 ed i 14 giorni. Quando la guarigione è completa, il suo medico potrà rimuovere cautamente il sistema per la chiusura della cute.
- Prima della rimozione, non graffiare, strofinare o forare la rete. Si potrebbe causare il distacco dell'adesivo e della rete prima della guarigione della ferita.
- In caso in cui si accorga che il sistema di sintesi cutanea inizia a perdere tenuta o a staccarsi dalla cute, contatti il suo medico.

## Unguenti e liquidi <sup>1</sup>

Non si devono applicare unguenti o liquidi topici sull'incisione trattata con il sistema per la chiusura della cute, poichè, potrebbero causarne il distacco dalla cute prima della completa guarigione.



Materiale informativo per l'operatore sanitario.

Le informazioni contenute dovranno essere presentate al paziente a cura del medico dopo l'applicazione del prodotto.

Questo documento è fornito solo come indicazione generale e non contiene suggerimenti medici.

Le consigliamo di fare riferimento al suo chirurgo/medico generico per l'applicabilità di questo documento.

Per informazioni complete sul prodotto, leggere le istruzioni per l'uso allegate al prodotto.

Reference: 1. Ethicon Lab-0013100/Rev:6 DERMABOND™  
Prineo™ Skin Closure System, IFU. January 2020 Data on file

Johnson & Johnson AG  
ETHICON Gubelstrasse 34 6300  
Zug  
SWITZERLAND/ SCHWEIZ  
Tel.: +41 58 2312333  
Fax: +41 58 231524  
www.jnjmedtech.com

# ETHICON

Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

242872-230314 CH