

# DERMABOND™ PRINEO™

PANSEMENT DE CICATRISATION

## LE SOIN DE VOTRE PLAIE

Votre professionnel de santé a choisi d'utiliser le pansement DERMABOND™ PRINEO™ pour aider à la cicatrisation de votre plaie. Ce pansement utilise l'association d'un treillis auto-adhésif et d'un adhésif liquide qui permet de maintenir la plaie fermée pendant tout le processus de cicatrisation.



### PENDANT LA CICATRISATION

Le pansement DERMABOND™ PRINEO™ doit rester en place jusqu'à ce que **votre professionnel de santé ait déterminé que la cicatrisation soit suffisante**, qui survient généralement entre 7 et 14 jours.

- **Ne grattez pas, ne frottez pas et ne jouez pas avec le pansement.** Cela pourrait détacher l'adhésif et la protection avant que la cicatrisation ne soit complète.
- **Si vous remarquez que le pansement DERMABOND™ PRINEO™ commence à se décoller et à se détacher de la peau,** contactez votre professionnel de santé.
- **Si vous constatez une rougeur, un gonflement, une gêne, une chaleur ou du pus,** contactez votre professionnel de santé.



### RETRAIT DU PANSEMENT

Votre professionnel de santé vous indiquera quand le processus de cicatrisation est **terminé** et que le pansement DERMABOND™ PRINEO™ est prêt à être retiré. Le système DERMABOND™ PRINEO™ est conçu pour se détacher de façon naturelle ou peut être retiré par votre professionnel de santé.



# DERMABOND™ PRINEO™

## PANSEMENT DE CICATRISATION

## À SAVOIR


Les conseils à connaître pour aider à la cicatrisation de votre plaie.

### POMMADES ET APPLICATIONS

Ne pas appliquer de médication liquide ou en pommade ou d'autres produits sur la plaie pendant que le pansement DERMABOND™ PRINEO™ est en place. Ceux-ci peuvent le décoller de la peau avant que la plaie ne soit complètement cicatrisée.

### EXERCICE PHYSIQUE

- Ne faites pas d'exercice physique qui pourrait créer une tension supplémentaire sur votre plaie ou qui pourrait humidifier le système DERMABOND™ PRINEO™ à cause de la transpiration.
- Suivez les conseils de votre professionnel de santé pour connaître le moment où vous pourrez reprendre une activité physique régulière.

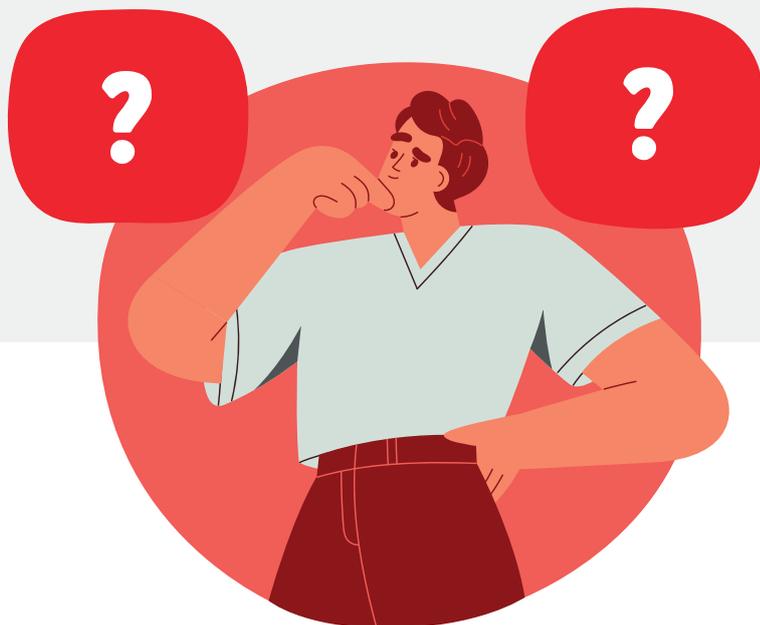

### BAIN ET DOUCHE

Sur les conseils de votre professionnel de santé, vous pouvez **occasionnellement et brièvement mouiller** votre plaie dans le bain ou sous la douche.

- Pas de nage autorisée, ou d'immersion prolongée de la plaie. Seulement un bain rapide ou une douche.
- Après la douche ou le bain, **tamponnez délicatement** avec une serviette douce pour sécher le pansement. **Ne le frottez pas.**
- Si un pansement de protection est utilisé par-dessus le pansement DERMABOND™ PRINEO™, il doit **être remplacé par un pansement sec après la douche ou le bain**, conformément aux instructions de votre praticien de santé.

© Johnson & Johnson AG 2023, 240518-230217 CH

# ETHICON

*Johnson & Johnson* SURGICAL TECHNOLOGIES

Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas un avis médical. Il est conseillé de discuter avec votre chirurgien ou médecin traitant de l'applicabilité de ce document.

La colle à usage cutané DERMABOND™ est conçue pour une application locale uniquement dans le but de maintenir fermés les bords cutanés de plaies se rapprochant facilement et résultant d'incisions chirurgicales, y compris les perforations consécutives à une intervention peu invasive, et des lacerations traumatiques préalablement correctement nettoyées. La colle DERMABOND™ ne remplace pas les sutures dermiques profondes ou sous-cutanées. Avant toute utilisation, se référer à la notice d'utilisation qui accompagne le dispositif et respecter les consignes d'utilisation y figurant et figurant sur l'étiquetage pour connaître les indications, les contre-indications, les effets secondaires, l'utilisation recommandée, les mises en garde et les précautions. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. DERMABOND™ est une marque d'Ethicon. une division de Johnson & Johnson AG · Ethicon · Gubelstrasse 34, 6300 Zug · Schweiz · Telefon +41 (0)58 / 231 - 23 33 · Fax +41 (0)58 / 231 - 25 24 · www.jnjmedtech.com

Document réservé à l'usage des professionnels de santé.